

INSTRUKCJA POBIERANIA KRWI PĘPOWINOWEJ

Akcesoria zestawu do pobrania krwi pępowinowej:

1. Woreczek na krew o objętości 250cm³ z jałową substancją konserwującą CPDA (35 cm³) i igłą 16G, (oznaczony znakiem CE - rejestracją w krajach Unii Europejskiej).
2. Jałowe gaziki nasączone alkoholem do dezynfekcji (2szt.).
3. Jałowa gaza.
4. Klamra pępowinowa.
5. Torebka plastikowa z kodem paskowym i zamknięciem taśmą samoprzylepną.
6. Żel utrzymujący temperaturę (2 kolorowe woreczki).
7. Tkanina absorbująca (obowiązkowa przy transporcie).
8. Mała przezroczysta koperta na dokumenty (formularz identyfikacyjny, instrukcję).
9. Pudełko styropianowe utrzymujące stałą temperaturę.
10. Kartonowe pudełko do transportu.

Jak należy pobrać próbkę krwi pępowinowej?

Pobrania krwi pępowinowej należy dokonać **przed urodzeniem łożyska**.
W przypadku, gdyby proces pobierania krwi zakłócał przebieg porodu, pobrania krwi można dokonać po urodzeniu łożyska.

1. Bezpośrednio po porodzie, (po upływie ok. 30 sekund), należy, zgodnie z zaleceniami FIGO, przeciąć pępowinę (normalne opatrzenie pępowiny).
2. Odkazić pępowinę w planowanym miejscu nakłucia za pomocą chusteczki nasączonej alkoholem.
3. Nakłuć pępowinę w odkażonym miejscu za pomocą igły przymocowanej do jałowego woreczka na krew.
4. Pobrać minimum 25 cm³ krwi pępowinowej, aby próbka była odpowiednia do przechowania. Po pobraniu, objętość krwi pępowinowej wraz z substancją konserwującą CPDA w woreczku musi wynosić minimum 60 cm³. Woreczek na krew powinien być umieszczony poniżej poziomu łożyska – wtedy w spływaniu krwi do woreczka pomaga siła grawitacji. Może się zdarzyć, że do pobrania odpowiedniej ilości krwi pępowinę trzeba będzie nakłuć w kilku miejscach. Prosimy odkazić te miejsca przed nakłuciem.
5. Po napełnieniu woreczka, wycisnąć krew z rurki do woreczka.
6. Zawiązać na rurce przynajmniej 2 węzły, aby zapobiec wyciekaniu krwi w czasie transportu (nie stosować w tym celu szwów, klamer pępowinowych ani zacisków do żył).
7. Odciąć igłę od rurki przeznaczając ją do utylizacji zgodnie z procedurami utylizacji odpadów szpitalnych.
8. Kilkakrotnie obrócić wolno woreczek, aby ułatwić wymieszanie krwi z substancją konserwującą CPDA.
9. Pobrany krew pępowinową należy trzymać w temperaturze pokojowej, nie umieszczać w chłodziarce ani zamrażarce.

Instrukcja pakowania:

1. Woreczek z krwią włożyć do plastikowej torebki z kodem paskowym i z zamknięciem taśmą samoprzylepną (oznaczonej „Safety Bag”). Obok woreczka z krwią włożyć płytkę tkaniny absorbującej. Zdjąć pasek folii zabezpieczającej taśmą samoprzylepną i zacisnąć zamknięcie. Po właściwym zamknięciu torebki plastikowej należy włożyć ją do pudełka utrzymującego temperaturę, pomiędzy dwa woreczki z kolorowym żelem (jeden na spodzie pudełka, drugi nad torebką z woreczkiem z krwią).
2. Należy wypełnić formularz identyfikacyjny dziecka i umieścić w dołączonej małej foliowej kopercie. Pudełko z próbką krwi oraz foliową kopertę z formularzem identyfikacyjnym należy włożyć do kartonowego pudełka transportowego i umieścić w kolorowej foliowej Kopercie Przewozowej. Kopertę Przewozową wraz z wypełnionym już uprzednio Listem Przewozowym przechować do momentu odebrania przez kuriera w bezpiecznym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Bezwzględnie należy powiadomić telefonicznie firmę Cryo-Save Polska o przygotowaniu próbki do transportu!
Tel. (22) 85 55 428 czynny 8-16 lub 0-509 829 021 czynny całą dobę.

Cryo-Save Polska Sp. z o.o.